

フワット

腰がつかなくて座れない？
腰を浮かせて座圧軽減！



ろっ骨につけるコルセットと、
イスにのせるフレームが、
座った時に体を“フワット”支えます。



ワンタッチでベルトを装着します

おなかにベルトをまわして止めるだけで、装着できます。
手間なく装着できるため、初めて使用する方も安心です。
ベルトも、気持ちの良い長さに自由自在に変更できます。

イスにそのまま座るだけ

すきなイスに、そのまま座るだけで腰をやさしく支えます。
支える強さは、フワットの高さを変えることで調整します。




床に座る時も利用可能

たたみの上やカーペットの上など、
椅子を使わずに座る時も使えます。

座圧が軽減されます

腰やお尻にかかる圧力（右図）を
フワットのフレームが支えます。

※フワットは腰の負担を軽減するもので、
腰痛を治療するものではありません。

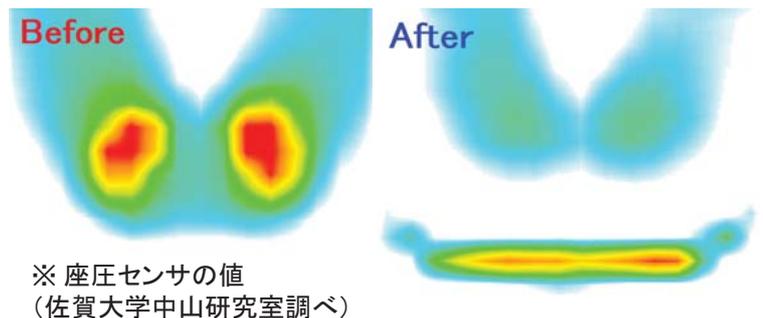

<価格>

- 定価：36,000円（税込，送料込）
（日本国外へは発送できません）
- 製造：三惠工業株式会社（国内産）
- 販売：(株)山城機巧（佐賀大学ベンチャー）
〒840-8502 佐賀県佐賀市本庄1
佐賀大学理工学部7号館308室

<購入方法>

フワット専用サイト

<<http://fwat.fit/>>

から「購入申込書」をお送りください。



お問合せ先

株式会社 山城機巧 社長 山城佑太
佐賀大学理工学部 准教授 中山功一

E-mail: knakayama@is.saga-u.ac.jp（中山功一）



高さの調節は自由自在

2本の柱を回転させることで高さの調節ができます。
一回転させるごとに、約5mmずつ高く／低くなります。
装着パットを外して、ちょうど良い高さに調整して下さい。

様々な体形に調整可能

以下の方に推奨されます。

- ・身長130cm～195cm
- ・体重100kg以下
- ・ウエスト55cm～110cm



ジャケットの下に隠れます

コンパクトな設計なので、装着したまま、
上からジャケットなどを着ることができます。
外出しても人目を気にすることはありません。

<仕様>

- ・高さ：30cm～47cm（調整可能）
- ・横幅：43.7cm（底部の最大幅）
- ・重さ：1160g
（フレーム865g、装着パット295g）




<ご使用にあたっての注意点>

- ・座る際に指などを挟まないようにお気を付けください
- ・慣れるまでは、体重の半分以上を支えないでください
- ・慣れるまでは、60分以上の連続装用はお控えください

<ご使用の制限>

- 以下の方は、利用をご遠慮ください。
- ・体重100kg以上の方（破損する恐れがあります）
 - ・ウエスト110cm以上の方（ベルトが届きません）
 - ・自分で着脱できない方、意思疎通のできない方
 - ・骨粗しょう症や胸部ろっ骨に疾患のある方
（かかりつけの医師にご相談ください）

<メディア等での紹介>

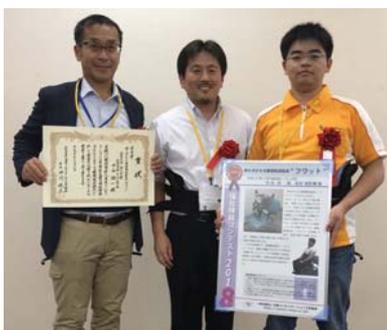

福祉機器コンテスト2018で
優秀賞を受賞しました



テレビ東京「WBストレッチたま」
で紹介されました



クラウドファンディング：Makuakeで
300万円を超えるご支援をいただき、
商品化されました。